

3


Bien faire votre injection

Avec nordipen®*

La première fois que vous utilisez votre stylo ou lorsque vous devez changer de cartouche...

Pour insérer la cartouche

- 1 Dévisser le réservoir du corps du stylo
- 2 Remettre la tige du piston à zéro
- 3 Insérer la cartouche dans le réservoir, vérifier que le code couleur de la cartouche correspond à la couleur du stylo
- 4 Revisser le corps du stylo sur le réservoir

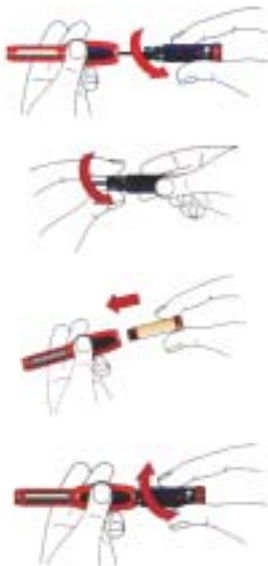

6

* Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'utilisation du nordipen .

A chaque injection...

Pour sélectionner la dose

- 1 Visser une aiguille sur le pas de vis coloré de la cartouche et retirer les protections externe et interne
- 2 Purger (en sélectionnant 0,1 mg et en appuyant sur le bouton-poussoir) jusqu'à ce qu'une goutte apparaisse à la pointe de l'aiguille
- 3 Sélectionner la dose (en mg) du produit à injecter en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre

Et injecter

- ▶ Appuyer à fond sur le bouton-poussoir pendant au moins 6 secondes.



7