

Modalités de déblocage d'un stylo Victoza®

Afin de débloquer un stylo Victoza® :

- Prendre une aiguille neuve compatible avec le stylo et retirer l'onglet en papier.
- Insérer solidement l'aiguille de manière bien droite sur le stylo, afin de suffisamment percer la membrane en caoutchouc. Nous vous conseillons pour cela de placer le stylo à la verticale, avec le bouton-poussoir placé contre une table, de manière à pouvoir visualiser un axe vertical à suivre, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.




- Une fois la nouvelle aiguille fixée sur le stylo, vérifier l'écoulement de l'insuline.

Nous vous informons que plusieurs raisons peuvent expliquer le blocage d'un stylo Victoza® :

- si l'aiguille n'est pas vissée dans l'axe du stylo ou si elle n'est pas assez solidement vissée sur le stylo et qu'elle ne perce donc pas suffisamment la membrane en caoutchouc (figure B),

B Retirez l'onglet de protection en papier d'une aiguille neuve à usage unique. Vissez solidement et de manière bien droite l'aiguille sur votre stylo.

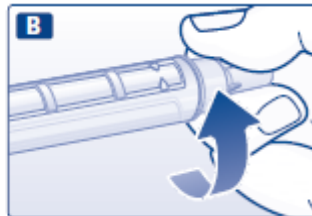

- si le bouton poussoir est actionné après la sélection de la dose alors qu'aucune aiguille n'est attachée sur le stylo,
- si l'aiguille est endommagée,
 - ⚠ Prenez garde à ne pas plier ou abîmer l'aiguille.
- si le stylo est endommagé,

Entretien de votre stylo Victoza®

Votre stylo Victoza® est précis et sûr d'utilisation. Mais vous devez en prendre soin :

- N'essayez pas de réparer votre stylo ou de le démonter.
- Protégez votre stylo de la poussière, de la saleté et de toute sorte de liquides.
- Nettoyez le stylo avec un chiffon imbibé de détergent doux. Ne pas essayer de le laver, de le tremper ou de le lubrifier, cela peut endommager le stylo.

⚠ Si vous avez fait tomber votre stylo sur une surface dure ou si vous avez l'impression qu'il ne fonctionne pas correctement, vous devez toujours mettre une aiguille neuve à usage unique et vérifier l'écoulement avant d'effectuer l'injection.

- si l'aiguille n'est pas retirée du stylo après chaque injection car le liquide peut précipiter à l'intérieur de l'aiguille et la boucher.
 - ⚠ Utilisez toujours une aiguille neuve lors de chaque injection pour prévenir le risque de contamination.
 - ⚠ Retirez toujours l'aiguille après chaque injection et conservez votre stylo Victoza® sans aiguille attachée.

- s'il n'y a plus suffisamment de produit restant dans le stylo pour une dose entière,

Si le sélecteur de dose se bloque avant que la dose dont vous avez besoin ne se trouve en face de l'indicateur, cela veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de liraglutide restant pour une dose entière. Dans ce cas, vous avez le choix entre deux solutions :

Fractionner votre dose en deux injections :

Tournez le sélecteur de dose dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que la valeur 0,6 mg ou 1,2 mg se trouve en face de l'indicateur.

Injectez la dose. Préparez un nouveau stylo pour injection puis injectez le nombre de mg restant pour compléter votre dose.

Injecter la totalité de votre dose avec un nouveau stylo :

Si le sélecteur de dose se bloque avant que la valeur 0,6 mg ne se trouve en face de l'indicateur, préparez un nouveau stylo et injectez la totalité de la dose avec le nouveau stylo.

Afin d'éviter le blocage des stylos, il est nécessaire de suivre les instructions d'utilisation mentionnées dans la notice d'utilisation du produit, et notamment concernant le montage, le test d'écoulement et le démontage des aiguilles.

Vérification de l'écoulement

Vérifiez toujours l'écoulement comme indiqué ci-dessous, avant d'effectuer une injection avec un stylo neuf.

- E** Tournez le sélecteur de dose jusqu'à ce que le symbole de contrôle de l'écoulement se trouve en face de l'indicateur.



- F** Maintenez le stylo avec l'aiguille pointée vers le haut et tapotez doucement la cartouche avec votre doigt plusieurs fois. Cela fera remonter les bulles d'air éventuelles vers le haut de la cartouche.



- G** Gardez l'aiguille toujours pointée vers le haut et appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que le 0 mg se trouve en face de l'indicateur. Répétez les étapes E à G jusqu'à l'apparition d'une goutte de liraglutide au bout de l'aiguille. Si aucune goutte n'apparaît après avoir effectué six fois la procédure, remplacez l'aiguille et répétez les étapes E à G, jusqu'à six fois. Si vous ne voyez toujours pas de goutte de liraglutide, le stylo est défectueux et vous devez en utiliser un neuf.



- Si malgré cette manipulation, le stylo reste bloqué, contacter Novo Nordisk au 0800 80 30 70 (numéro vert), du lundi au vendredi de 9h à 18h, pour effectuer une réclamation.